

# Sonda Vaginal Liberty Loop

Ref. 5033435131365



## INDICACIONES PARA EL USO

La sonda intravaginal está destinada para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina a través de la estimulación muscular y un equipo de bioalimentación electromiográfica aprobada por EN60601-01.

## IMPORTANTE

- Solo para uso personal
- Puede ser utilizada por la misma paciente.
- Lavar antes del primer uso.
- No utilizar si el envase está abierto o dañado.

## CONTRAINDICACIONES

No utilizar el Estimulador Muscular en los casos siguientes:

- Marcapasos implantado, puede alterar el correcto funcionamiento del aparato.
- Embarazo, se desconoce la influencia sobre el feto.
- Infección vaginal o de vejiga, o una cicatriz quirúrgica reciente, la introducción de la sonda puede agravar la infección.
- Con historial de carcinoma en el lugar de la estimulación, los pruebas de laboratorio muestran que la estimulación eléctrica puede aumentar la división celular.

## SE ACONSEJA CUIDADO EN LOS CASOS SIGUIENTES

- Pacientes con la sensibilidad del tejido muscular alterada o reducida, la estimulación excesiva puede resultar en inflamación del tejido.
- Pacientes con el historial de epilepsia, el uso de la estimulación eléctrica puede bajar el umbral del ataque.
- Vida útil del producto en uso: 6 meses

# Sonda Vaginal Liberty Loop

Ref. 5033435131365

## LIMPIEZA

El electrodo Liberty está destinado para el uso de un sólo paciente.

Antes del primer uso y después de los siguientes, el aparato se debe limpiar de la manera siguiente:

Lavar el electrodo incluyendo el cable en agua templada con jabón. Enjuagar con agua limpia.

Secar el electrodo con un trapo limpio/toalla de papel y dejar fuera hasta que esté completamente seco, antes de reponer en la bolsa de plástico.

NO SUMERGIR en líquido.

NO UTILIZAR agua hirviendo.

Eliminación de residuos

Limpiar y tirar de acuerdo con las regulaciones locales.

## INSTRUCCIONES DEL USO

1. Sacar el electrodo del paquete y limpiarlo.
2. Introducir el cable en la ranura dentro de la sonda.
3. Aplicar una capa fina de lubricante al electrodo, e introducirlo hasta que la pestaña de la base del electrodo se apoye entre los labios vaginales.
4. Asegurarse que el estimulador muscular o el equipo de bioretroalimentación electromiográfica están apagados, y conectar el aparato con el electrodo a través de los extremos del conector.
5. Seguir las instrucciones del fabricante acerca del uso del estimulador o la unidad de bioretroalimentación.
6. Después de utilizar, apagar el aparato, desconectar el cable del electrodo y limpiar como se indica arriba.

## PUNTERO DE BIOFEEDBACK

Puede adjuntar el puntero a la base de la libertad de bucle para mostrar el efecto de la contracción muscular correcto.

Se puede utilizar con la estimulación o para ayudar a los ejercicios de Kegel voluntarias.

Durante una contracción correcta el puntero debe moverse hacia abajo.